

UC-C LAMBALI KURUTMA VE DEZENFEKSİYON CİHAZI

Kullanım Talimatı

Kapak Electric Disinfection Dryer, ısıtma cihazlarınızı aynı anda kurutur ve dezenfekte eder. Kullanım talimatı aşağıdaki gibidir:

- Öncelikle kabloyu cihazın yan tarafına ve güç adaptörüne bağlayın.
- Daha sonra güç adaptörünü prize takın.
- Başlamak için kurutucunun kapağını açın ve ısıtma cihazlarını kurutma istasyonunun içine yerleştirin.(Şarj edilemeyen ısıtma cihazları ise pilleri çıkarmayı unutmayın.)
- Kapağı yavaşça kapatın, sensör düğmesine kısaca bastığınızda bir bip sesi duyacaksınız ve bir titreşim hissedeceksiniz, artık elektrikli dezenfeksiyon kurutucusu açılmıştır.
- Buradaki ışık, mikropları ve bakterileri %99,9'a kadar yok edecek UVC ışığıdır ve ışıklar 8 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Bundan sonra 3 saatlik kuruma süreci başlar ve buradaki LED ışık her 37 dakikada bir birer birer söner.
- 3 saat sonra dezenfeksiyon ve kurutma işlemi biter ve cihaz otomatik olarak kapanır.
- Cihaz çalışırken ve kapatmak istediğinizde, uzun titreşimli uzun bir bip sesi duyuncaya kadar tuşuna 3 saniye boyunca basın.
- Son olarak ısıtma cihazlarınızı kullanmadan önce soğutmayı unutmayın.